

DUEFFE 2000 Srl Via Borghetto Madonna del Pozzo, 7 00136 Roma Tel: 0639726428 – 0639730183 Fax: 0639751799	RAPPORTO INTERVENTO TECNICO	Pag 1 di 1
---	--	------------

CLIENTE: ASL RIETI

OSPEDALE: RIETI

Via J.F. KENNEDY CAP 02100 CITTA' RIETI PROV. (RI)

DATI APPARECCHIATURA:

COLONNA AMBULATORIALE KARL STORZ TP101

RIFERIMENTO RICHIESTA:

23-871 DEL 19/05/23

RICHIEDENTE:


PAOLA GRILLO

PROBLEMA SEGNALATO:

MANCATO FUNZIONAMENTO IN CORRELAZIONE AI RESETTORI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ESEGUITE:

Data intervento	24/05/23
Attività eseguite e Conclusioni	<p>Ad una prima analisi la colonna si presenta nella stessa configurazione da noi consegnata ed installata e non mostra alcun segno di malfunzionamento.</p> <p>La stessa valutazione si può estendere ad i resettoscopi.</p> <p>Una volta effettuato il collegamento tra la testa camera, i resettoscopi e l'elettrobisturi Martin, in utilizzo presso la sala parto, la colonna endoscopica entra in modalità protezione e mostra artefatti visivi ogni qualvolta venga applicata una corrente di taglio di intensità massima G3(secondo quanto riportato dall'elettrobisturi). Il disturbo si riduce al decrescere della potenza erogata dal generatore.</p> <p>Separati i componenti si procedere a testare il funzionamento di ogni singolo elettromedicale.</p> <p>Provati separatamente i dispositivi non mostrano alcun errore per cui si procedere ad escludere ed a sostituire ciascun elemento.</p> <p>Il disturbo continua a presentarsi fino alla sostituzione della testa camera in dotazione con un altro modello presente nella vostra struttura.</p> <p>Appurato quindi che, in queste condizioni operative, non si presenta alcun tipo di disturbo si procede al ritiro della telecamera ed all'analisi di quest'ultima nei nostri locali.</p> <p>Come si evince dalle foto in allegato risulta evidente che, probabilmente a seguito di un evento traumatico, la continuità del C-Mount risulta compromessa e dunque l'integrità strutturale e dell'isolamento elettrico dell'intera testa camera è venuta meno</p> <p>In definitiva il disturbo è imputabile alla perdita di isolamento del componente ritirato.</p> <p>A riprova di ciò si fa notare che alla sostituzione della testa camera il malfunzionamento non si presenta.</p> <p>Essendo il guasto dovuto ad una deformazione strutturale del componente le condizioni di garanzia non sono valide.</p> <p>Nel caso foste interessati vi inviamo in allegato la nostra migliore offerta per la sostituzione in Ripari&Exchange della telecamera.</p>

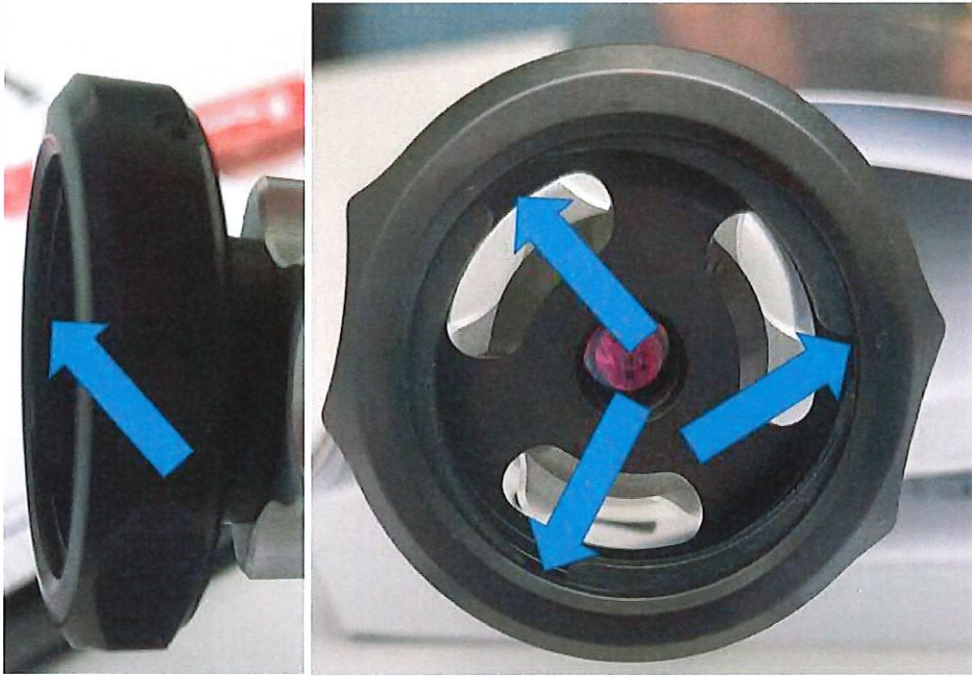

<p>Letto, approvato e Sottoscritto</p>	<p>Letto, approvato e Sottoscritto</p>
<p>Per DUEFFE 2000 SRL</p> <p>Firma: <i>[Signature]</i></p> <p>Tecnico addetto alle attività:</p> <p>Nome: ALESSANDRO Cognome: MAGNANTI</p> <p>Firma: <i>Alessandro Magnanti</i></p> <p>Data: 07/06/2023</p>	<p>Cliente:</p> <p>Nome: Cognome:</p> <p>Firma:</p> <p>Data:</p>