

Report di ispezione

Numero riferimento Cliente : 25000000480
Numero riferimento Olympus : 52267778

Olympus Customer Service

Olympus Italy S.R.L.

Via Modigliani 45
20054 Segrate (Milano)
E-Mail:

Cliente

AUSL RIETI
MAG. ECONOMALE 8.30 - 13 (LUN/VEN)
VIA J.F. KENNEDY
02100 RIETI (RI)
E-Mail: p.grillo@asl.rieti.it

Strumento

Modello : GIF-H190N
Matricola : 2404385
CustomerAssetID :

Gent.mo Cliente

Il suo strumento è stato attentamente ispezionato. L'analisi effettuata e i difetti riscontrati sono documentati con le relative immagini nel report allegato


Per qualunque informazione , non esiti a contattarci

Introduzione del Discovery report


nr.	Ispezione	Risultato
1	Usi cumulativi	230 times
2	Tempo cumulativo	5543 min
3	Ispezione della Tenuta	Fallito
4	Ispezione della continuità elettrica	Passato
5	Isolamento Tubo di Inserzione	Passato
6	Verifica isolamento del terminale distale	Passato
7	Ispezione della connessione del connettore del portaluca	Passato
8	Funzioni ID - Modelli con chip Scope ID incorporato che utilizzano processori video GIR	Passato
9	Verifica funzione NBI - Modelli con capacità NBI	Passato
10	Verifica immagine - illuminazione	Passato
11	Controllo immagine - White/Black Dots	Fallito
12	Disturbi in immagine/Immagine scopare angolando	Passato
13	Controllo immagine - bagliore/striscia	Passato
14	Controllo immagine - Risoluzione	Passato
15	Controllo immagine - appannamento	Passato
16	Ispezione funzione SW	Passato
17	Contatto acqua	Passato
18	Ispezione alimentazione dell'acqua	Passato
19	Volume di erogazione aria	Passato
20	Controlli dell'Area Umida: Sistema di Canali	Passato
21	Volume di aspirazione	Passato
22	Volume Alimentazione dell'Aria al minimo	Passato
23	Passaggio della pinza	Passato
24	Ispezione funzione RFID - Modelli con built-in RFID Chip	Passato
25	Verifica passaggio spazzolino per la pulizia	Passato
26	Rotazione della manopola comandi/Indicazioni di Angolazione/Gioco della manopola/Angoli di flessione	Fallito
27	Posizione manopole (neutra)	Passato
28	Slittamento freno manopole U/D-R/L (rotazione simultanea)	Passato
29	Verifica freni manopole UD/RL	Passato
30	Angolo di ritorno del tratto angolabile	Impossible
31	Aspetto generale	Non critico

nr.	Ispezione	Risultato
32	Ispezione del fascio p-luce	Passato
33	Cappuccio distale (c-cover) - Graffi, ammaccature, incrinature o impatti	Passato
34	Aspetto dell'Ugello	Passato
35	Obiettivo - Crepe, schegge, graffi o macchie	Passato
36	Obiettivo LG - crepe, schegge, graffi o macchie	Passato
37	Guainetta - tensione, allentamento, graffi o deterioramento	Passato
38	Guainetta - Pieghe/cedimenti	Passato
39	Guainetta - Usura del collante e verifica condizione della legatura	Passato
40	Proprietà di curvatura del tratto di inserzione	Impossibile
41	Torsione del tratto di inserzione	Impossibile
42	Curvatura e usura tubo di inserzione, curvatura e usura tubo di inserzione sul cono di protezione	Impossibile
43	Connessione di una parte della Sezione del Tratto Angolabile al tratto di inserzione	Impossibile
44	Isolamento esterno Leva Freno UD	Passato
45	Rimozione Acqua (BCU)	Passato
46	Rimozione Acqua (Impugnatura)	Passato
47	Ispezione delle macchie d'acqua (connettore S, serie 190/185/290)	Passato
48	Ispezione etchettatura	Passato
49	Rimozione dell'acqua del canale dell'endoscopio	Passato

Dettaglio dei guasti

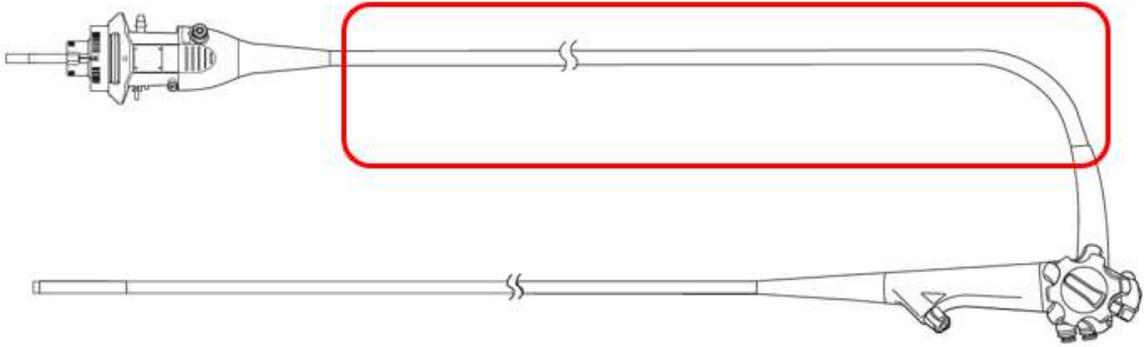nr.	Risultato	Riparazione	Condizioni
Cavo universale			
			
31	Aspetto generale Non critico	Cavo universale il cavo universale ha un graffio.	Crepa, danno o deformazione di parti
			


Connettore dell'endoscopio

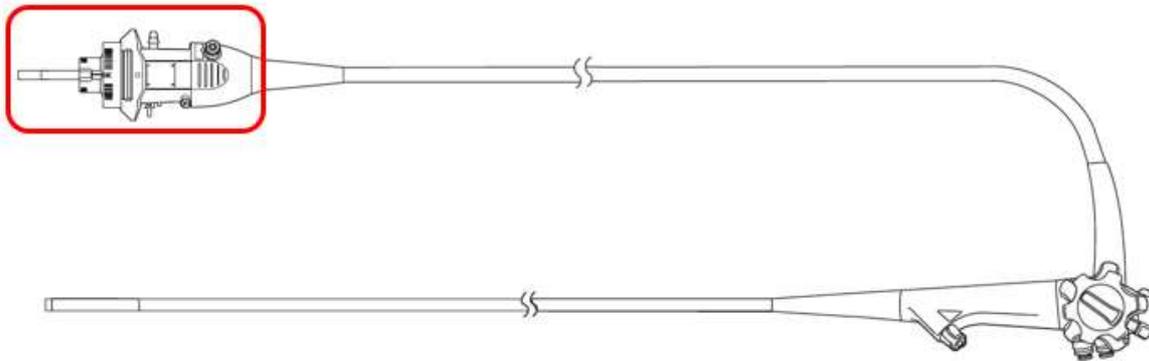

nr.	Risultato	Riparazione	Condizioni
Aspetto generale			
31	Non critico	Boccaglio	Difetti visibili
		Il boccaglio è corrosivo.	



Impugnatura

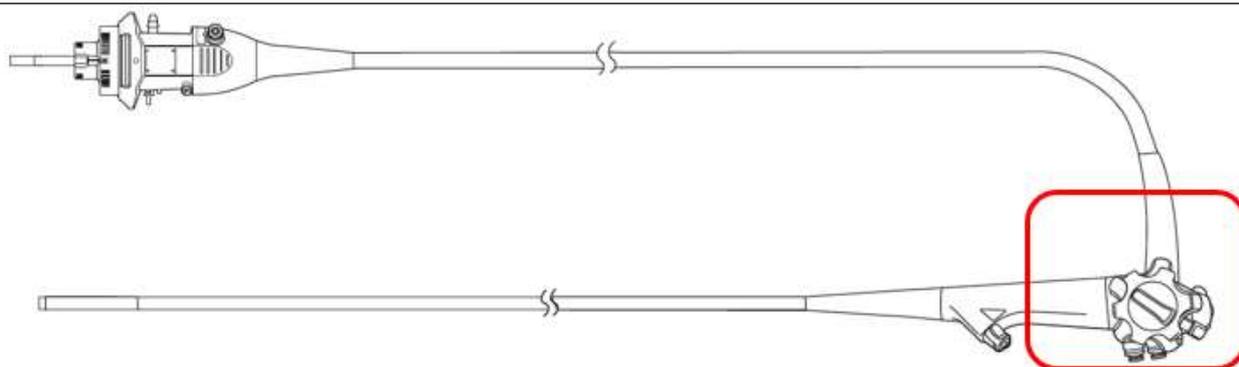

nr.	Risultato	Riparazione	Condizioni
-----	-----------	-------------	------------

nr.	Risultato	Riparazione	Condizioni
Aspetto generale			
31	Non critico	Manopola destra-sinistra	Crepa, danno o deformazione di parti
		La manopola destra-sinistra ha un graffio.	



Tubo di inserione			

nr.	Risultato	Riparazione	Condizioni
Ispezione della Tenuta			
3	Fallito	Guainetta	Foro
		A causa di un foro sulla guainetta, la tenuta stagna viene a mancare.	



nr.	Risultato	Riparazione	Condizioni
11	Fallito	Controllo immagine - White/Black Dots	
		Unità CCD	Crepa, danno o deformazione di parti
A causa di un danno all'unità CCD, l'immagine presenta dei punti bianchi.			
26	Fallito	Rotazione della manopola comandi/Indicazioni di Angolazione/Gioco della manopola/Angoli di flessione (Confirmed User Complaint)	
		Cavo di angolazione	Usura
A causa dell'usura del filo angolare, l'angolo di piegatura in direzione BASSO non soddisfa il valore standard.			

Protocollo di test
Test di Sicurezza elettrica ed impermeabilità dell'endoscopio

Terra	3,36	Ω	Passato
I valori di misurazione (impostazione della valvola di regolazione della portata al 50%)	57,3	M Ω	Passato
Modalità extra piccola: differenza tra il valore della pressione sull'UHI-5 e il valore visualizzato sul	1053,7	M Ω	Passato
Risultato Generale			Passato

Data : 01.04.2025

Questo è un documento automatico, valido anche se privo di firma