

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
 C.F. e P.I. 00821180577

**U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione**

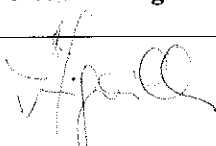
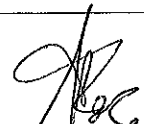


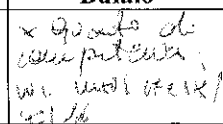
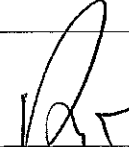
**DIRETTORE: Ing. Erminio Pace**

Tel. 0746/279786 – Fax 0746.279774 – e-mail: [e.pace@asl.rieti.it](mailto:e.pace@asl.rieti.it)

**PROCEDURA DI LAVORO E DI SICUREZZA  
 RISCHIO BIOLOGICO**

**"GESTIONE POMPE  
 ELASTOMERICHE"**

REVISIONE	DATA
Emissione	25/02/16
1	
2	
3	

DIRETTORE GENERALE Dott. <sup>ssa</sup> L. Figorilli	RSPP Ing. E. Pace	TdP Dott. <sup>ssa</sup> S. Muggia	ASPP Dott. M. Di Mario	MEDICO COMPETENTE Dott. <sup>ssa</sup> P. Del Bufalo	DMO RIETI Dott. P. Manzi
				 x quanto di competenza; in data 25/02/16 P. Del Bufalo	

## GESTIONE POMPE ELASTOMERICHE

**PREMESSA:** per questa procedura lavorativa far riferimento anche al relativo Protocollo clinico-assistenziale elaborato a livello Aziendale, nell'ambito del "Progetto di ridefinizione dei percorsi assistenziali ed organizzativi nell'assistenza domiciliare integrata", Revisione 2008

**PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE:**

telino monouso, pompa elastomerica, contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali, siringa monouso e soluzione fisiologica (se necessario).

**OPERATORI COINVOLTI IN QUESTA PROCEDURA:** Personale Infermieristico

**PREPARAZIONE DELL' OPERATORE:**

l'operatore deve utilizzare i seguenti D.P.I.:

- **Guanti sterili/non sterili:** di categoria III (D.P.I.), marcati CE e rispondenti alle norme tecniche EN374 , EN 420
- **Camici e/o tute sterili/non sterili:** di categoria III (DPI), marcati CE e rispondenti alla norma tecnica EN 14126
- **copricapo, sovrascarpa:** DPI (cat. III)
- **occhiali oppure visiera:** marcati CE e rispondenti alle norme tecniche EN 166, EN 167, EN 168
- **N.B.:** nel caso in cui la procedura lavorativa venga espletata nei confronti di pazienti portatori/sospetti portatori di patologie aerotrasmissibili, al fine di proteggere l'operatore dall'inalazione di aerosol potenzialmente contaminati, l'operatore deve anche indossare: il Facciale filtrante FFP2 o FFP3 secondo le indicazioni riportate nella Valutazione del Rischio, marcati CE per la protezione da agenti biologici di gruppo 2 e 3. Si precisa che il Facciale filtrante FFP2 o FFP3 va indossato, salvo diversa indicazione del Dirigente Responsabile a seguito di specifica indagine diagnostica.

### DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA LAVORATIVA "GESTIONE POMPE ELASTOMERICHE"

FASE LAVORATIVA	TIPI DI ESPOSIZIONE POSSIBILE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
1. Il sistema viene riempito con una tecnica asettica da personale specializzato, l'elastomero viene debitamente etichettato: data di preparazione, nome del pz., farmaci utilizzati e loro dosaggio	- Nessuna esposizione	- Eseguire la procedura con cautela  - Indossare i Dispositivi di Protezione Individuali sopra indicati
2. L'operatore effettua il lavaggio sociale delle mani e raccorda l' elastomero ad un sistema venoso centrale o periferico, effettuando un lavaggio con soluzione fisiologica, per la rimozione di eventuali coaguli di sangue	- Esposizione cutanea - Esposizione muco-cutanea	

<p>3. Nel caso in cui l'operatore voglia rimuovere l'elastomero, lo sraccorda dal sistema venoso centrale o periferico e lo smaltisce nel contenitore per rifiuti speciali, riordinando il materiale utilizzato</p>	<p>- Esposizione cutanea</p>	
---	------------------------------	--