


MODALITA' D'USO DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO SALIVARE COPAN LoliSponge

IL DISPOSITIVO E' PRONTO ALL'USO E NON RICHIEDE ALCUNA FASE DI PREPARAZIONE

CONTENUTO

Copan LoliSponge™ è un dispositivo costituito da una provetta in plastica etichettata con un tappo a vite. Il tappo presenta un bastoncino con spugne assorbenti. Copan LoliSponge™ è fornito all'interno di una busta trasparente.

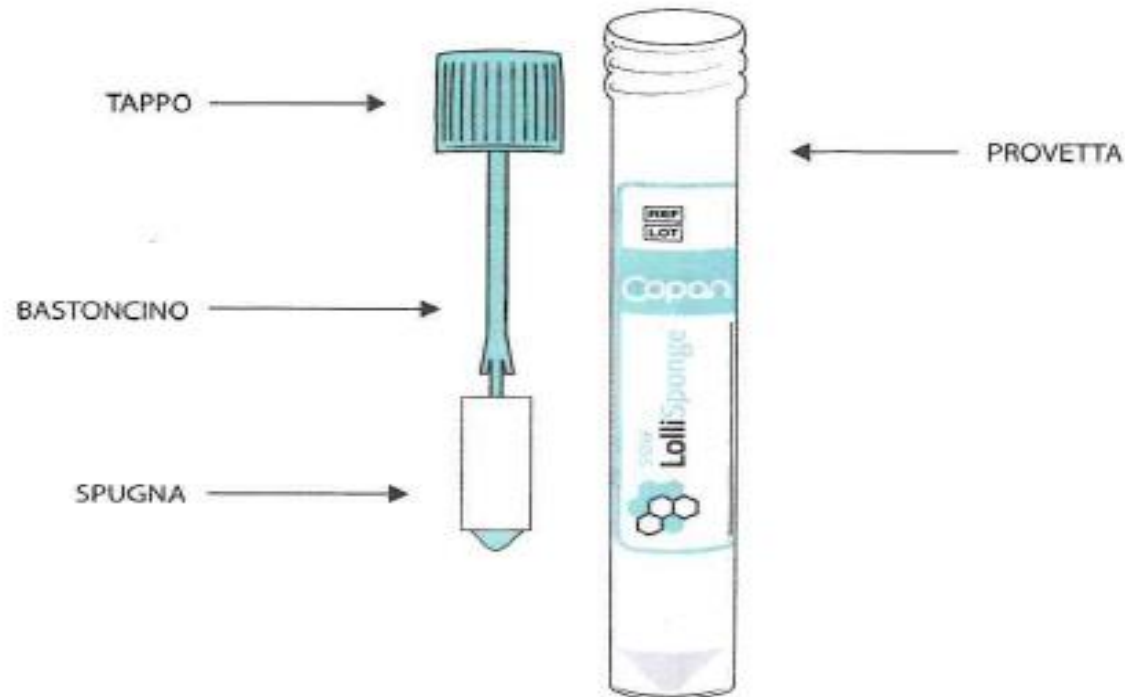

il prelievo in 4 mosse

1

PRIMA DI INIZIARE...

LAVARSI LE MANI
CON ACQUA E SAPONE
SCIACQUARLE
ASCIUGARLE
O IGIENIZZARLE

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



Resta sempre aggiornato su: salutelazio.it

Rete scuole che promuovono salute



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver mangiato, bevuto, o lavato i denti




2

**APRIRE LA PROVETTA TENENDO IL DISPOSITIVO
DAL TAPPO**

3

INSERIRE IL DISPOSITIVO ALL'INTERNO DELLA BOCCA E
MUOVERLO DELICATAMENTE ALL'INTERNO NELLA PARTE
SUPERIORE DELLA LINGUA TRA I DENTI E LA GUANCIA,
PER 60 SECONDI IN MODO DA INUMIDIRE BENE LE SPUGNE

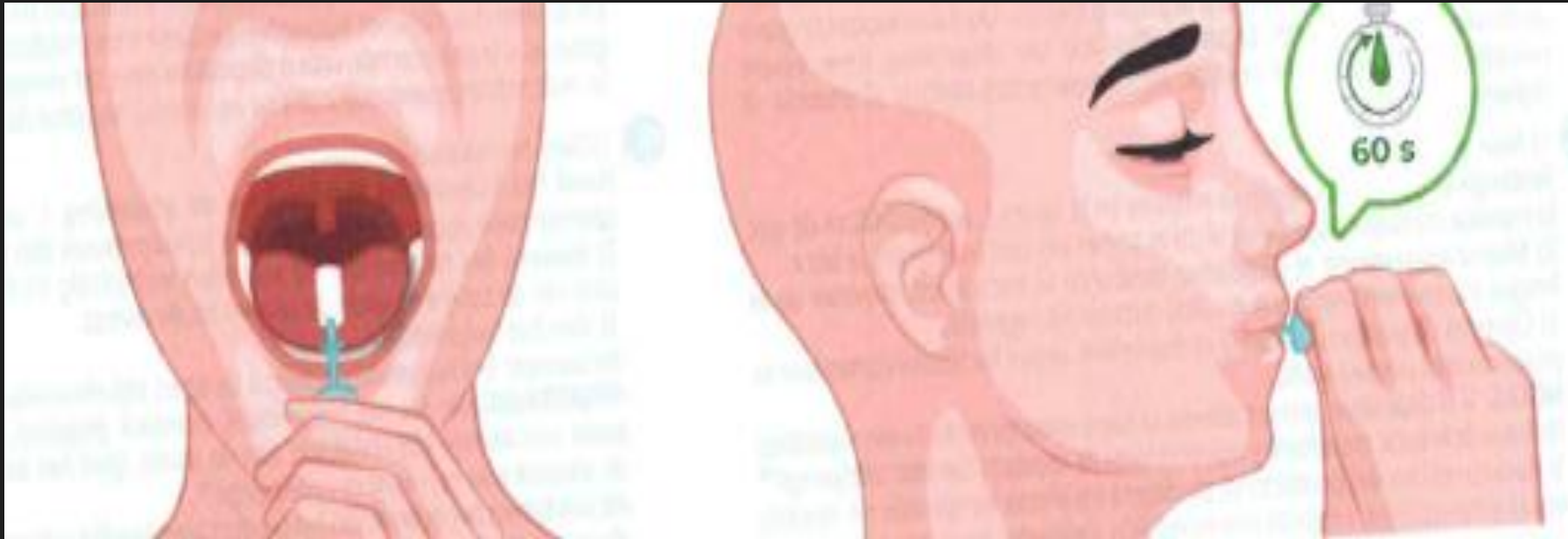

NON FORZARE O PREMERE ECCESSIVAMENTE
NON TOCCARE CON LE MANI LA SPUGNETTA
NON MORDERLA CON I DENTI LA SPUGNETTA

4

POSIZIONARE IL TAPPO SULLA PROVETTA RIAVVITARLO
CHIUDERE SALDAMENTE LA PROVETTA
E RESTITUIRE IL DISPOSITIVO

